

6.1 BANGERTER

Fogli di occlusione sec. Bangerter


Fogli di occlusione semitrasparenti applicabili sulla lente dell'occhio sano per il recupero della funzione visiva dell'occhio più debole. Parziale passaggio della luce secondo una scala di 10 valori (da 1,0 fino all'occlusione totale di 0,0).

Utilizzo: nella profilassi dell'ambliopia, della esclusione e della corrispondenza retinica anomala dell'ambliopia; dei disturbi della correlazione, della afachia monolaterale e della diplopia temporanea.




Esempio di visione della lettera A con i differenti valori di occlusione


Dimensioni: 65x65 mm. - Conf. 1 pc.

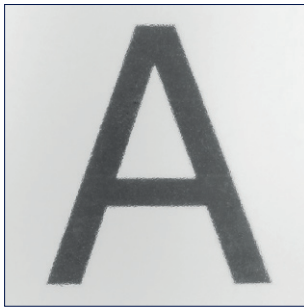


Ref. 08001 Visus ~1.0 - N 1
Visual Acuity ~20/20

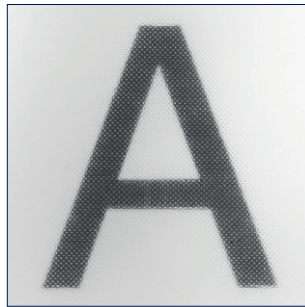


Ref. 08002 Visus ~0.8 - N 2
Visual Acuity ~20/265

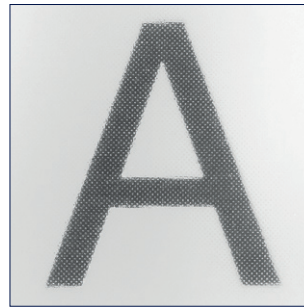


Ref. 08003 Visus ~0.6 - N 3
Visual Acuity ~20/30

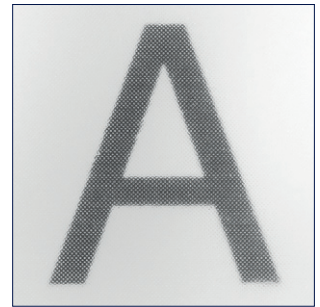


Ref. 08004 Visus ~0.4 - N 4
Visual Acuity ~20/50

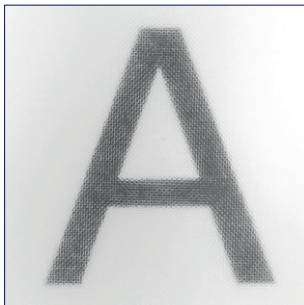


Ref. 08005 Visus ~0.3 - N 5
Visual Acuity ~20/70

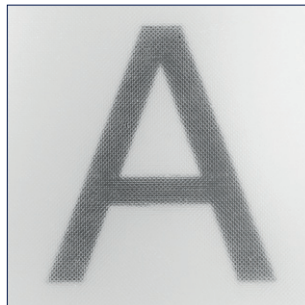


Ref. 08009 Visus ~0.2 - N 6
Visual Acuity ~20/100

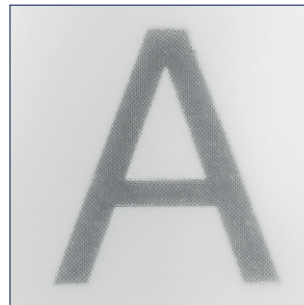


Ref. 08006 Visus ~0.1 - N 6
Visual Acuity ~20/200

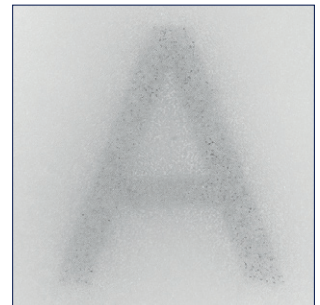

Ref. 08007 Visus <0.1 - N 7
Visual Acuity ~20/300

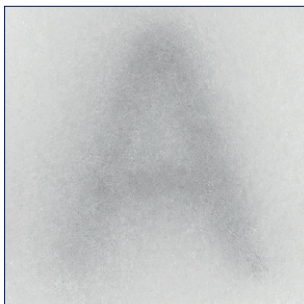


Ref. 08000 Visus LP - N 0
Visual Acuity none

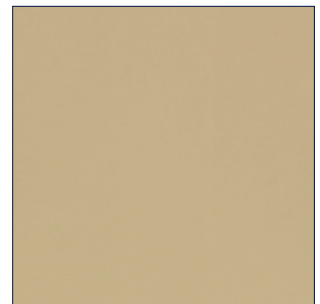

Ref. 08008 Visus 0.0
Visual Acuity none

Fogli di occlusione sec. Bangert

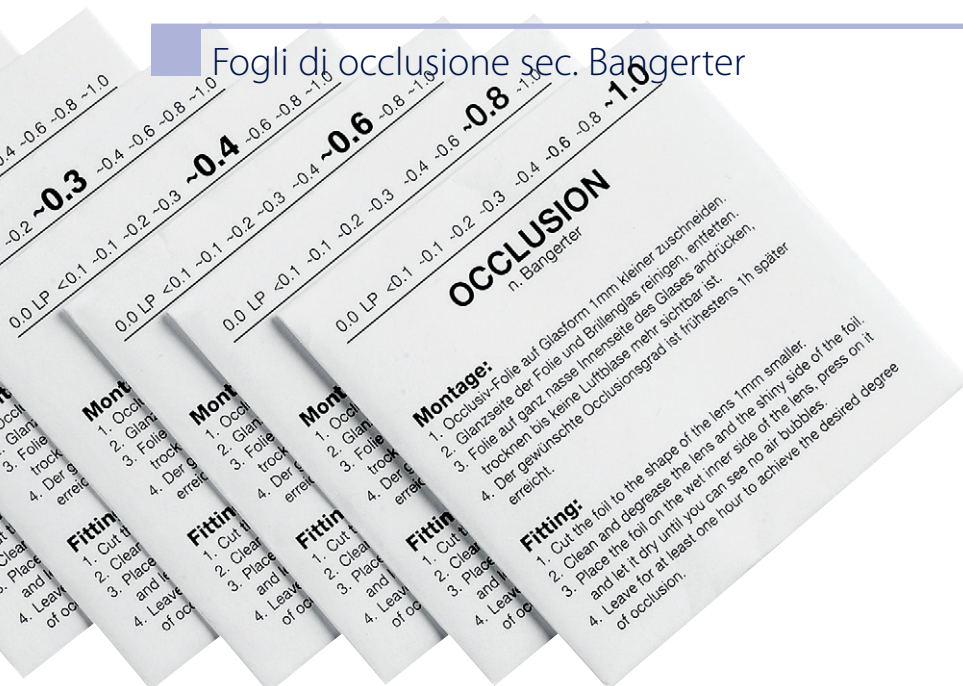

Ref.	08008	08000	08007	08006	08009	08005	08004	08003	08002	08001
Vision	0.0	Light perception	<0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0
Corr. No.	8	0	7	6	-	3	4	5	2	1
Approx Visual Acuity	none	none	~20/300	~20/200	~20/100	~20/70	~20/50	~20/30	~20/25	~20/20

Ref. 08017

Kit display con assortimento dei 10 valori di occlusione dei fogli di Bangert con indicazione valori e codici. QR Code per video applicazione.

Ref. 11315

Display.
Dimensioni: 24x24x1 cm.



INFO APPLICAZIONE

Si applica la parte lucida del foglio sulla parte interna della lente.

- Ritagliare il foglio dando una sagoma leggermente più piccola rispetto a quella della lente.
- Pulire bene la lente.
- Inumidire la parte lucida del foglio con acqua tiepida applicarla sulla parte interna della lente
- Premere con un panno asciutto per rimuovere le bolle d'aria e le tracce di umidità.

